

Inleiding

U, of het aan u toevertrouwde kind, heeft een kunststof orthese voor het onderbeen gekregen. Het doel en gebruik van de orthese heeft de instrumentmaker met u doorgenomen toen de orthese werd afgeleverd. Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om de vragen over het gebruik en onderhoud, die u mogelijk nog hebt, te beantwoorden.

Benaming

De orthese is een kunststof enkel voet orthese. De orthese is individueel op maat gemaakt volgens een gipsafdruk dat van het been genomen is. De orthese is gemaakt van co-polymeer met een polyetheen polstering. Co-polymeer zorgt voor de sterkte van de orthese terwijl het polstermateriaal voor een goede drukverdeling op het been zorgt en drukplekken zoveel mogelijk voorkomt. Van beide materialen zijn geen allergische reacties bekend zijn.

Doel

De orthese is bedoeld om de voet in een gecorrigeerde positie te fixeren gedurende de afgesproken periodes. Hoelang en wanneer de orthese gedragen moet worden is afhankelijk van het behandelplan van uw medisch specialist.

Gebruik

Het aantrekken gaat doorgaans het makkelijkst als u de knie wat gebogen houdt. Terwijl u zit laat u dan de voet en het been aan de voorzijde in de orthese glijden, waarna de banden gesloten worden. Controleer vooral in het begin de huid op verkleuringen, nadat de orthese een periode is gedragen. Een verkleuring op plaatsen waar correcties worden doorgevoerd is doorgaans normaal en vormt geen probleem. Ontstaan er drukplekken of blaren, neemt u dan contact op met Westland orthopedie b.v. voor een controle afspraak.

Onderhoud

Op uw hulpmiddelpaspoort staat een datum vermeld wanneer u een afspraak kunt maken voor een onderhoudsbeurt van uw voorziening.

Service

Westland orthopedie b.v. besteedt veel zorg aan de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over het product of over de manier waarop wij u geholpen hebben, laat u het ons dan weten. Wij zullen dan al het mogelijke doen om uw klacht te verhelpen.

Garantie

Op al onze leveringen zijn de garantievoorwaarden vastgesteld door Orthobanda, welke zijn gedeponereerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag, van toepassing. Deze garantievoorwaarden zijn op verzoek ook op onze hoofdvestiging te Delft ter inzage beschikbaar.