

Inleiding

U heeft een kunststof orthese voor het onderbeen gekregen. Het doel en gebruik van de orthese heeft de instrumentmaker met u doorgenomen toen de orthese werd afgeleverd.

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om de vragen over het gebruik en onderhoud, die u mogelijk nog hebt, te beantwoorden.

Benaming

De orthese is een kunststof enkel voet orthese. Hij wordt ook wel "Engen orthese" genoemd.

De orthese is individueel op maat gemaakt volgens een gipsafdruk dat van uw been is genomen.

De orthese is gemaakt van polipropyleen, dit is een duurzaam materiaal wat goed door de huid verdragen wordt en waarvan geen allergische reacties bekend zijn.

Doel

De orthese is bedoeld om de voet in de zwaafase van de grond te houden en te voorkomen dat u struikelt. Het is dan ook niet meer nodig uw been hoog op te tillen om dit te voorkomen.

Gebruik

Het makkelijkst is de orthese te dragen in schoenen met een veter- of klittenband sluiting.

De orthese kan gedragen worden in schoenen met een hakhoogte tussen 1,5 en 2,5 cm. Als u nieuwe schoenen koopt is het aan te bevelen hierop te letten en indien mogelijk de orthese tijdens de koop in de schoenen te passen. Het aantrekken gaat doorgaans het makkelijkst als u de orthese in de volledig geopende schoen plaatst. Terwijl u zit laat u dan de voet (met sok of kous) aan de voorzijde in de orthese glijden, waarna de kuitband en de schoen gesloten wordt. Gebruik de orthese altijd als u buitenshuis gaat, binnenshuis kunt u kijken of u zonder kunt, maar pas wel op voor struikelen. Controleer vooral in het begin de huid op verkleuringen, nadat u de orthese heeft gedragen. Een lichte verkleuring, die binnen vijf minuten na het uitdoen verdwijnt is doorgaans geen probleem. Blijft de verkleuring langer bestaan of heeft u pijn door de orthese, neemt u dan contact op met Westland orthopedie b.v. voor een controle afspraak.

Onderhoud

Op uw hulpmiddelpaspoort staat een datum vermeld wanneer u een afspraak kunt maken voor een onderhoudsbeurt van uw voorziening.

Service

Westland orthopedie b.v. besteedt veel zorg aan de kwaliteit van de door haar geleverde producten.

Mocht u desondanks niet tevreden zijn over het product of over de manier waarop wij u geholpen hebben, laat u het ons dan weten. Wij zullen dan al het mogelijke doen om uw klacht te verhelpen.

Garantie

Op al onze leveringen zijn de garantievoorwaarden vastgesteld door Orthobanda, welke zijn

gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag, van toepassing.

Deze garantievoorwaarden zijn op verzoek ook op onze hoofdvestiging te Delft ter inzage beschikbaar.