

Inleiding

U heeft een kunststof orthese voor uw been gekregen. Het doel en gebruik van de orthese heeft de instrumentmaker met u doorgenomen toen de orthese werd afgeleverd. Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om de vragen over het gebruik en onderhoud, die u mogelijk nog hebt, te beantwoorden.

Benaming

De voorziening die u gekregen heeft, wordt ook wel "KEVO" (Knie Enkel Voet Orthese) genoemd. De orthese is individueel op maat gemaakt, d.m.v. het gipsafdruk dat van uw been is genomen. De orthese is gemaakt van polypropyleen, dit is een duurzaam materiaal wat goed door de huid verdragen wordt en waarvan geen allergische reacties bekend zijn. Verder bevinden zich aan de buiten- en binnenzijde van de KEVO, metalen kniescharnieren die aan zogenaamde systeemstangen zijn bevestigd. Met klinknagel verbindingen zijn deze stangen op het polypropyleen geklonken. Aan de schoen zit is een schoenbeugel vastgemaakt, waardoor middels enkelscharnieren, de schoen aan de rest van de beugel is bevestigd. Tevens bevindt zich aan de schoen een T-leer wat ervoor zorgt dat de enkel niet naar binnen of buiten kan kantelen tijdens het staan

Doel

De orthese is bedoeld om het been te stabiliseren vooral tijdens de standfase. Doordat de normale functie van het been is verstoord, zult u de KEVO gebruiken om dit functieverlies te compenseren.

Gebruik

De orthese kan slechts gedragen worden met de schoenen waaraan de schoenbeugel is bevestigd. Het aantrekken gaat doorgaans het makkelijkst als u de voet in de volledig geopende schoen plaatst. Terwijl u zit (liefst op het puntje van een stoel) laat u dan de voet, aan de voorzijde in de schoen glijden. Een handig hulpmiddel hierbij is een schoenlepel. Het kniescharnier moet zich in een gebogen positie bevinden. Als de voet in de schoen zit, kunnen daarna de sluitbanden op het boven- en onderbeengedeelte worden gesloten. Vervolgens sluit u de schoen en het T-leer rondom het tegenoverliggend enkelscharnier.

U kunt nu gaan staan. Als uw KEVO kniescharnieren met een vergrendelingssysteem bezit, strek dan altijd het been volledig en wees ervan bewust dat het kniescharnier ook daadwerkelijk vergrendeld is, voordat u kunt gaan lopen

Controleer vooral in het begin de huid op verkleuringen, nadat u de orthese heeft gedragen.

Een lichte verkleuring, die binnen vijf minuten na het uitdoen verdwijnt is doorgaans geen probleem.

Blijft de verkleuring langer bestaan of heeft u pijn door de orthese, neemt u dan contact op met

Westland orthopedie b.v. voor een controle afspraak.

Onderhoud

Op uw hulpmiddelpaspoort staat een datum vermeld wanneer u een afspraak kunt maken voor een onderhoudsbeurt van uw voorziening.

Service

Westland orthopedie b.v. besteedt veel zorg aan de kwaliteit van de door haar geleverde producten.

Mocht u desondanks niet tevreden zijn over het product of over de manier waarop wij u geholpen hebben, laat u het ons dan weten. Wij zullen dan al het mogelijke doen om uw klacht te verhelpen.

Garantie

De garantievoorwaarden zijn op verzoek ook op onze hoofdvesting te Delft ter inzage beschikbaar.