

Inleiding

U heeft een kunststof orthese voor uw been gekregen. Het doel en gebruik van de orthese heeft de instrumentmaker met u doorgenomen toen de orthese werd afgeleverd. Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om de vragen over het gebruik en onderhoud, die u mogelijk nog hebt, te beantwoorden.

Benaming

De voorziening die u gekregen heeft, wordt ook wel "KEVO" (Knie Enkel Voet Orthese) genoemd. De orthese is individueel op maat gemaakt d.m.v. een gipsafdruk dat van uw been is genomen. De orthese is gemaakt van polypropyleen, dit is een duurzaam materiaal wat goed door de huid verdragen wordt en waarvan geen allergische reacties bekend zijn. Verder bevinden zich aan de buiten- en binnenzijde van de KEVO, metalen kniescharnieren die aan zogenaamde systeemstangen zijn bevestigd. Met klinknagel verbindingen zijn deze stangen op het polypropyleen geklonken.

Doel

De orthese is bedoeld om het been te stabiliseren vooral tijdens de standfase. Doordat de normale functie van het been is verstoord, zult u de KEVO gebruiken om dit functieverlies te compenseren.

Gebruik

Het makkelijkst is de orthese te dragen in schoenen met een veter- of klittenband sluiting. De orthese kan gedragen worden in schoenen met een hakhoogte tussen 1,5 en 2,5 cm. Als u nieuwe schoenen koopt is het aan te bevelen hierop te letten en indien mogelijk de orthese tijdens de koop in de schoenen te passen. Het aantrekken gaat doorgaans het makkelijkst als u de orthese in de volledig geopende schoen plaatst. Terwijl u zit, laat u dan de voet (met sok of kous) aan de voorzijde in de orthese glijden, waarna de sluitbanden op het boven- en onderbeengedeelte kunnen worden gesloten. Vervolgens sluit u de schoen. U kunt nu gaan staan. Als uw KEVO kniescharnieren met een vergrendelingssysteem bezit, strek dan altijd het been volledig en wees ervan bewust dat het kniescharnier ook daadwerkelijk vergrendeld is, voordat u kunt gaan lopen. Controleer vooral in het begin de huid op verkleuringen, nadat u de orthese heeft gedragen. Een lichte verkleuring, die binnen vijf minuten na het uitdoen verdwijnt is doorgaans geen probleem. Blijft de verkleuring langer bestaan of heeft u pijn door de orthese, neemt u dan contact op met Westland orthopedie b.v. voor een controle afspraak.

Onderhoud

Op uw hulpmiddelpaspoort staat een datum vermeld wanneer u een afspraak kunt maken voor een onderhoudsbeurt van uw voorziening.

Service

Westland orthopedie b.v. besteedt veel zorg aan de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over het product of over de manier waarop wij u geholpen hebben, laat u het ons dan weten. Wij zullen dan al het mogelijke doen om uw klacht te verhelpen.

Garantie

Deze garantievoorwaarden zijn op verzoek ook op onze hoofdvestiging te Delft ter inzage beschikbaar.