

Inleiding

U heeft een kunststof orthese voor uw been gekregen. Het doel en gebruik van de orthese heeft de instrumentmaker met u doorgenomen toen de orthese werd afgeleverd. Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om de vragen over het gebruik en onderhoud, die u mogelijk nog hebt, te beantwoorden.

Benaming

De voorziening die u gekregen heeft, wordt ook wel "KEVO" (Knie Enkel Voet Orthese) genoemd. De orthese is individueel op maat gemaakt d.m.v. een gipsafdruk dat van uw been is genomen. De orthese is gemaakt van polypropyleen, dit is een duurzaam materiaal wat goed door de huid verdragen wordt en waarvan geen allergische reacties bekend zijn.

Doel

De orthese is bedoeld om het been te stabiliseren/ondersteunen. Verder kan het bescherming bieden voor het aangedane been.

Gebruik

De orthese kan niet gedragen worden met de schoenen. Het aantrekken gaat doorgaans het makkelijkst terwijl u zit (liefst op het puntje van een stoel). U laat dan de voet (met sok of kous) aan de voorzijde in de orthese glijden, waarna de sluitbanden op het boven- en onderbeengedeelte kunnen worden gesloten. Lukt het niet om de orthese tijdens het zitten aan te trekken dan kunt u het beste het been geheel gestrekt houden. Schuif nu de orthese onder het been omhoog en sluit vervolgens de banden.

Controleer vooral in het begin de huid op verkleuringen, nadat u de orthese heeft gedragen. Een lichte verkleuring, die binnen vijf minuten na het uitdoen verdwijnt is doorgaans geen probleem. Blijft de verkleuring langer bestaan of heeft u pijn door de orthese, neemt u dan contact op met Westland orthopedie b.v. voor een controle afspraak.

Onderhoud

Op uw hulpmiddelpaspoort staat een datum vermeld wanneer u een afspraak kunt maken voor een onderhoudsbeurt van uw voorziening.

Service

Westland orthopedie b.v. besteedt veel zorg aan de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over het product of over de manier waarop wij u geholpen hebben, laat u het ons dan weten. Wij zullen dan al het mogelijke doen om uw klacht te verhelpen.

Garantie

Deze garantievoorwaarden zijn op verzoek ook op onze hoofdvestiging te Delft ter inzage beschikbaar.