

### **Inleiding**

U heeft een onderbeenprothese gekregen. Het gebruik van de prothese heeft de instrumentmaker met u doorgenomen toen de prothese werd afgeleverd. Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om de vragen over het gebruik en onderhoud, die u mogelijk nog heeft, te beantwoorden.

### **Benaming**

De harde buitenkoker is individueel op maat gemaakt door middel van een gipsafdruk. In de harde buitenkoker draagt u een liner, gemaakt van siliconen. Deze liner vangt de schokken op en vermindert daardoor de wrijf- en drukpunten in de koker.

De koker en de liner zijn met elkaar verbonden d.m.v. een pin, koordje of vacuümsysteem.

### **Doel**

De prothese is bedoeld om het geamputeerde onderbeen te vervangen.

### **Het gebruik van de liner**

#### **Het aandoen van de liner**

Zorg dat de binnenkant van de liner schoon is, droog en vrij van vreemde voorwerpen die huidirritatie kunnen veroorzaken. Draai de liner binnenstebuiten en pak hem vast zoals op het plaatje.

Plaats het uiteinde tegen de stomp en rol hem met lichte druk omhoog over de stomp, er mogen geen luchtzakjes gevormd worden. Let er goed op dat u de liner niet beschadigt met uw vingernagels. Trek of ruk niet aan de liner.

### **Onderhoud van de liner**

De liner moet dagelijks na gebruik van binnen en buiten gewassen worden. Dit doet u door de binnenste buiten getrokken liner onder lauw stromend water, met neutrale zeep te reinigen. Na het schoonmaken moet u de liner zorgvuldig afspoelen met water en aan beide zijden droog wrijven met een stofvrije doek. De liner kan na het wassen gelijk gebruikt worden, hij hoeft niet te drogen.

Krachtige was- of reinigingsmiddelen, wasverzachters of bleekmiddelen kunnen de liner beschadigen.

Breng de liner zo snel mogelijk na het schoonmaken terug in zijn normale positie.

De liner mag niet lang binnenste buiten gekeerd blijven of blootgesteld worden aan grote hitte of zonlicht.