

Inleiding

U heeft een orthese voor het onderbeen gekregen. Het doel en gebruik van de orthese heeft de instrumentmaker met u doorgenomen toen de orthese werd afgeleverd. Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om de vragen over het gebruik en onderhoud, die u mogelijk nog hebt, te beantwoorden.

Benaming

Deze orthese wordt een “peroneusveer” genoemd. De orthese is individueel op maat gemaakt volgens een tekening die van uw been gemaakt is. De orthese is gemaakt van roestvast verenstaal, polipropyleen polstermateriaal, leder en klittenband.

Doel

De orthese is bedoeld om de voet in de zwaafase van de grond te houden en te voorkomen dat u struikelt en om de enkel en voet tijdens het lopen te ondersteunen.

Gebruik

Het aantrekken gaat doorgaans het makkelijkst als u over het been een sokje of kous draagt. Terwijl u zit laat u dan de voet in de schoen glijden, waarna de kuitband en de schoen gesloten worden. Gebruik de orthese altijd als u buitenshuis gaat, binnenshuis kunt u kijken of u zonder kunt, maar pas wel op voor struikelen. De gekozen lederen materialen worden over het algemeen goed door de huid verdragen. In een enkel geval zijn er allergische reacties door ons waargenomen, dit heeft dan veelal te maken met de gebruikte looistoffen. Controleer vooral in het begin de huid op verkleuringen, nadat u de orthese heeft gedragen. Een lichte verkleuring, die binnen vijf minuten na het uitdoen verdwijnt is doorgaans geen probleem. Blijft de verkleuring langer bestaan of heeft u pijn door de orthese, neemt u dan contact op met Westland orthopedie b.v. voor een controle afspraak.

Onderhoud

Op uw hulpmiddelpaspoort staat een datum vermeld wanneer u een afspraak kunt maken voor een onderhoudsbeurt van uw voorziening. Dit dient elk half jaar te gebeuren om te zorgen dat u optimaal kunt blijven functioneren met uw voorziening.

Service

Westland orthopedie b.v. besteedt veel zorg aan de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over het product of over de manier waarop wij u geholpen hebben, laat u het ons dan weten. Wij zullen dan al het mogelijke doen om uw klacht te verhelpen.

Garantie

Op al onze leveringen zijn de garantievoorwaarden vastgesteld door Orthobanda, welke zijn gedeponereerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag, van toepassing. Deze garantievoorwaarden zijn op verzoek ook op onze hoofdvestiging te Delft ter inzage beschikbaar.