

NEOPREEN

Neopreen kan voorzichtig worden afgewassen met water en een schone doek. Gebruik zachte zeep en een borstel met zachte haren om oppervlaktevuil te verwijderen. Laat uw schoenen niet weken, dompel ze niet onder in water en laat ze niet direct naast een warmtebron drogen. (Opmerking: het is moeilijk om lichte kleuren weer 'als nieuw' te laten uitzien.)

SYNTHETISCH LEER

Synthetisch leer kan voorzichtig worden afgewassen met water en een schone doek. Gebruik zachte zeep en een borstel met zachte haren om oppervlaktevuil te verwijderen. Laat uw schoenen niet weken, dompel ze niet onder in water en laat ze niet direct naast een warmtebron drogen.

BUITENZOLEN

Rubberen zijkanten kunnen voorzichtig worden afgewassen met water en een schone doek. Gebruik zachte zeep en een borstel met zachte haren om oppervlaktevuil te verwijderen. Laat uw schoenen niet weken, dompel ze niet onder in water en laat ze niet direct naast een warmtebron drogen. Schoenen moeten regelmatig worden gecontroleerd op slijtage van de zolen en hielen. Als de zolen zodanig zijn versleten dat er een gat in zit, kunnen we de schoenen niet meer repareren. Schoenen met bloedvlekken, urine of ontlasting erop mogen niet naar de fabriek worden teruggestuurd. Maak de schoenen s.v.p. schoon voordat u ze voor reparatie teruggestuurt naar de fabriek.

BINNENZOLEN

Binnenzolen kunnen uit de schoenen worden genomen en met de hand worden gewassen met zachte zeep. Maak ze schoon met een vochtige doek met zeep als ze met een leren bovenlaag zijn bedekt. Doe uw binnenzolen niet in de droger, hierdoor kunnen ze krimpen of hun oorspronkelijke vorm verliezen.